


**Niet** aan de slang trekken bij het verwijderen van de katheter uit de houder.


Bij schade aan de katheter of slang **altijd** contact opnemen met uw PD verpleegkundige of ziekenhuis.

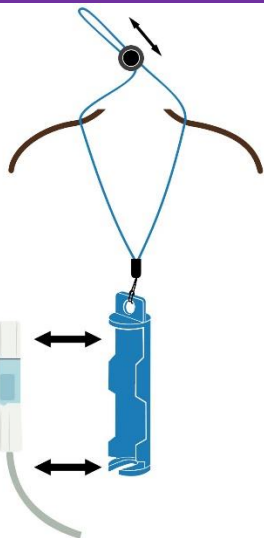

## Stap 1.

Hang het koord om je hals als een ketting. Plaats uw katheter in de houder zoals weergegeven in de afbeelding.


Je moet in staat zijn om je armen helemaal omhoog te strekken en dan mag je slang niet trekken aan je huidpoort. Er mag **nooit** spanning op de huidpoort staan.

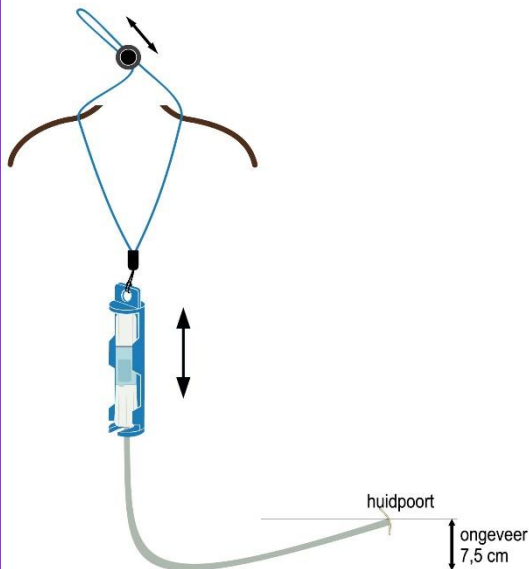

## Stap 2.

Stel nu de katheterhouder af door de ronde koordvergrendeling in te drukken en langs het touwtje omhoog of omlaag te schuiven. Stel de houder zo in dat de slang in een lus onder uw katheter hangt. Het laagste deel van de lus mag 4 tot 7,5 cm lager hangen dan de huidpoort, zoals in de afbeelding.

# Instructies voor gebruik van de PD katheterhouder.

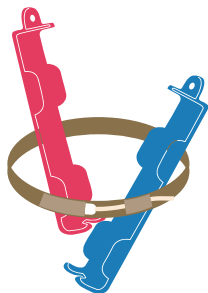

## PD nierzorg

*hulpmiddelen voor dialyse patiënten*

[pdnierzorg.nl](http://pdnierzorg.nl) / [info@pdnierzorg.nl](mailto:info@pdnierzorg.nl)

Katheterhouder met gekleurd koord.