


PD nierzorg

hulpmiddelen voor dialyse patiënten

Niet aan de slang trekken bij het verwijderen van de katheter uit de houder.


Bij schade aan de katheter of slang **altijd** contact opnemen met uw PD verpleegkundige of ziekenhuis.

Stap 1. Dag/Douche houder.

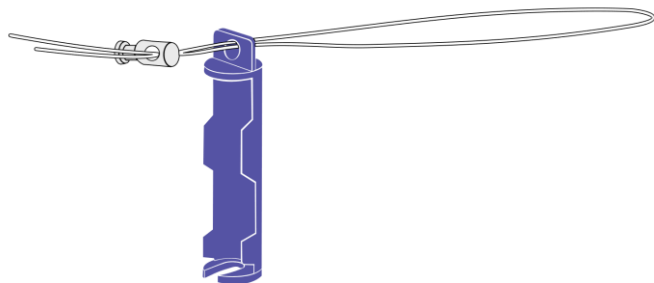


Neem het langste koord uit de verpakking, vouw het dubbel en steek het vervolgens door het gat in de houder zoals weergegeven in de afbeelding.

Stap 2.

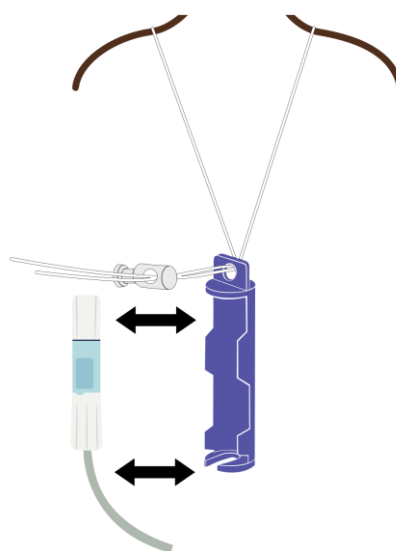


Hang het koord om je hals als een ketting. Plaats uw katheter in de houder zoals weergegeven in de afbeelding.

Stap 3.

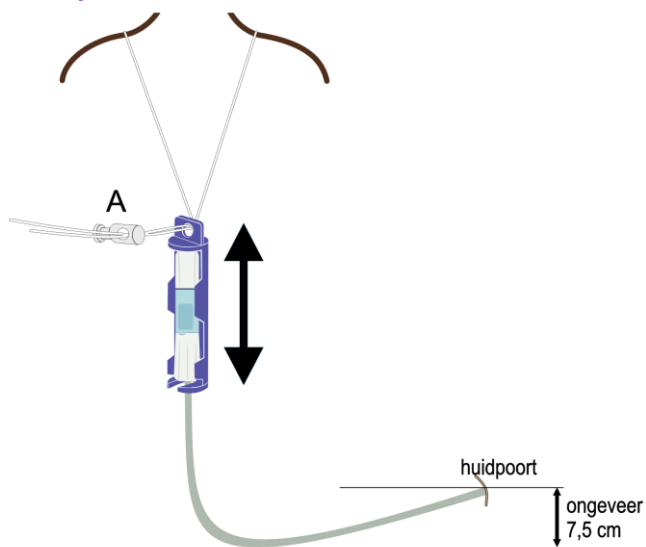

Stel nu de katheterhouder af door de houder langs het touwtje omhoog of omlaag te schuiven. Houd vervolgens de knop op de koordvergrendeling (A) ingedrukt, schuif deze omhoog naar de houder om hem op zijn plaats te houden. Stel de houder zo in dat de slang in een lus onder uw katheter hangt. Het laagste deel van de lus mag ongeveer 4 tot 7,5 cm lager hangen dan de huidpoort, zoals weergegeven in de afbeelding.


Stap 4.

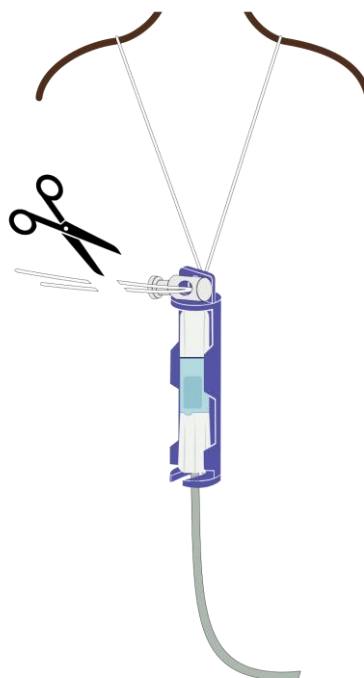

Je moet in staat zijn om je armen helemaal omhoog te strekken en dan mag je slang niet trekken aan je huidpoort. Er mag **nooit** spanning op de huidpoort staan. Als dit gebeurt, stelt u de houder opnieuw af door de knop op de

koordvergrendeling in te drukken en de houder omhoog of omlaag te schuiven om opnieuw af te stellen. Eenmaal aangepast, knip het overtollige touw af, of leg er een knoop in.

Stap 5.

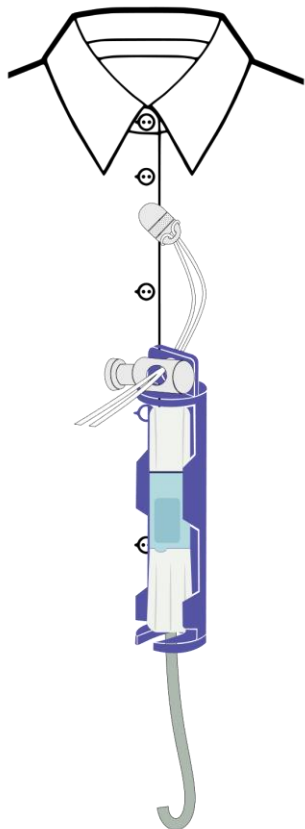


Een andere manier om de katheterhouder te gebruiken, is door hem aan een Klik-Clip te haken en dan aan je shirt, bh of ondergoed te bevestigen. Ook hier zorgt u ervoor het laagste deel van de lus ongeveer 4 tot 7,5 cm lager hangt dan de huidpoort. U kunt de houder dezelfde manier aanpassen als getoond op stap 3.

Deze Klik- Clip is kwetsbaar, en niet geschikt voor dikke

stoffen.

Er zit **geen garantie** op de Klik-Clip!!

Stap 6.

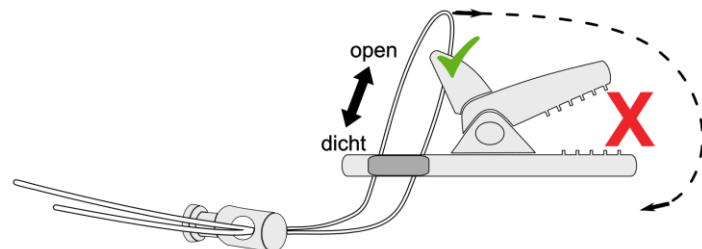

Klik-Clip.

Als u de Klik-Clip optie wilt gebruiken, vouw het kortste koord dubbel en steek het vervolgens door het gat in de houder zoals weergegeven in de afbeelding.


Haal het koord over de Klik-Clip en trek het koord vervolgens aan. Klem het vervolgens op een overhemd, bh of ondergoed.

Trek niet aan de bek van de Klik-Clip, maar gebruik alleen het kleine hendel aan de achterzijde omhoog of omlaag om te openen of te sluiten.

Deze Klik- Clip is kwetsbaar, en niet geschikt voor dikke stoffen.


Er zit **geen garantie** op de Klik-Clip!!

Stap 7. Alleen voor Baxter nachthouder.

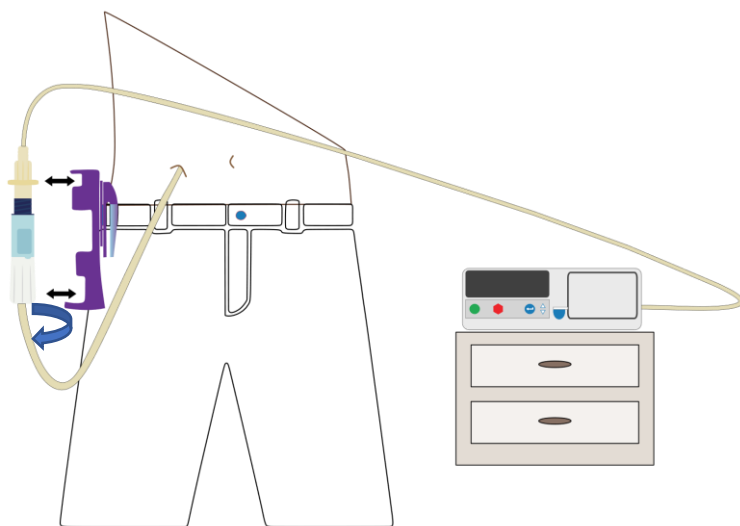

Nadat u de patiëntenlijn heeft aangesloten op uw katheter draait u de witte dop open en daarna plaatst u alles in de nachthouder.

Klem de houder vervolgens op uw pyjama of onderkleding, zoals weergegeven in de afbeelding. Bij de nachtkatheterhouder gebruikt u geen koord.

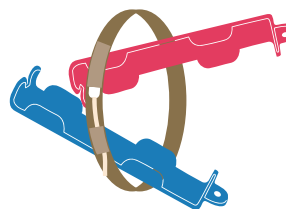

Instructies voor gebruik
van de PD katheterhouder.

PD nierzorg

hulpmiddelen voor dialyse patiënten

pdnierzorg.nl / info@pdnierzorg.nl