

# LANETTE

## PROTOCOL STRIAE & LITTEKENS

voor



na



**Producten:** BCN Cleanser, BCN Heal, BCN MesoVita, BCN ECQ10, BCN Base. Vitamin C. Glycolic Acid, BCN Base. Hyaluronic Acid 2%, Organic Silica & DMAE

**Methode:** Microneedling, Electroporatie, Iontophorese, Vacuumtherapie, Radiofrequentie

**Frequentie:** 2 behandelingen om de twee weken, minimaal 1 maximaal 3 behandelingen.

### Behandelprotocol

1. Reinig het te behandelen gebied van met een niet-alcoholisch product zoals BCN Cleanser.
2. Meng de hoeveelheid van de verschillende BCN producten in een schaalje en trek deze op in een injectiespuit.
3. Breng het mengsel aan door een kleine hoeveelheid uit de spuit te laten druppelen op het gebied en ga dan met apparaat over de striae of litteken totdat de hoeveelheid volledig is geabsorbeerd.
- 4 Na absorptie ga verder met het volgende gebied.
5. Respecteer de behandeltime en sterkte die door uw apparaat wordt aangegeven.
6. Sluit af door het behandelde gebied te in te smeren met BCN Heal.
7. Eventuele aftersale product voor thuisgebruik is BCN MesoVita.

Mengsel	Product	Hoeveelheid
Mix 1 Classics & Cocktails	BCN ECQ10	3 ml
	BCN Base	3 ml
	Vitamin C	2 ml
	Glycolic Acid	2 ml
Mix 2 Classics & Cocktails	BCN Base	3 ml
	Hyaluronic Acid 2%	2 ml
	Organic Silica & DMAE	2 ml





LANETTE MEDICAL BEAUTY

Member of the LANETTE Medical Distributor Group

Member of the BTP

Sint Pieterspark 69  
5014 SK Tilburg  
+31 (0)13-7857587  
[lanettemedical@kpnmail.nl](mailto:lanettemedical@kpnmail.nl)